

OBESIMED®

Medical device CE 0086

Voorkomt extreem overgewicht en overmatig eetgedrag
Ondersteunt een evenwichtig eetpatroon
Voor substantieel gewichtsverlies en de behandeling van obesitas

Algemeen advies

Lees de bijsluiter zorgvuldig door voordat u Obesimed® gaat gebruiken óók als u dit medisch hulpmiddel al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

Toepassing:

Obesimed® is een medisch hulpmiddel voor de behandeling van licht tot extreem overgewicht (obesitas) bij volwassenen en kinderen. Gebruik van Obesimed® voorkomt een overmatig eetgedrag, ondersteunt een evenwichtig eetpatroon en leidt tot substantieel gewichtsverlies. Obesimed® absorbeert grote hoeveelheden water en vormt een natuurlijke substantie die de maag vult. Dit geeft een vol gevoel en draagt daardoor bij aan verzadiging tijdens de maaltijd en de periode erna. Het bevordert de verzadiging van de maag waardoor extreem overgewicht wordt voorkomen en een ander eetpatroon wordt aangenomen.

Dosering en gebruik:

Obesimed® dient niet langer dan 30 dagen in 1 behandelingsperiode te worden gebruikt. Na 4 dagen kan de behandeling worden hervat. De capsule in zijn geheel innemen. Tijdens het afvallen en het gebruik van Obesimed® moet u de dagelijkse voeding aanvullen met een vitamine- en mineralenpreparaat van A t/m Z met 100% ADH.

Volwassenen: 3 x daags 2 capsules 1 uur voor de maaltijd innemen met 2 glazen water.

Kinderen vanaf 10 jaar: 2 - 3 x daags 2 capsules 1 uur voor de maaltijd innemen met 2 glazen water.

Aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden.

Samenstelling:

Het product is gebaseerd op plantaardige ingrediënten: OMTEC 19®, Amylum Solani, Hypromellose (E464), Oleum Helianthus, Titaniumdioxide (E171).

Het product is geschikt voor vegetariërs.

Allergenen:

Dit product bevat geen allergenen.

Gebruik tijdens zwangerschap en/ of borstvoeding:

Bij zwangerschap of borstvoeding wordt afgeraden af te vallen, mogelijke schadelijke stoffen uit het vetweefsel kunnen dan bij het kind terecht komen. Het gebruik van de Obesimed® wordt daarom afgeraden.

Gebruik in combinatie met geneesmiddelen:

Obesimed® verlaagt de glucosespiegel van het bloed. Gebruik in combinatie met andere dieet supplementen/geneesmiddelen, die een vergelijkbaar hypoglycemisch effect hebben, wordt daarom afgeraden. Orale medicijnen moeten 1 uur voor of 4 uur na gebruik van Obesimed® worden ingenomen.

Waarschuwingen:

- Obesimed® dient niet te worden gebruikt bij overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen. Bij twijfel of u Obesimed® mag gebruiken en/of in combinatie met een geneesmiddel mag gebruiken raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Let op! Capsule niet openen voor inname.
- Buiten bereik van jonge kinderen houden.
- Gebruik door kinderen alleen onder strikt toezicht van een volwassene.

Mogelijke bijwerkingen:

Obesimed® wordt goed verdragen en heeft weinig bijwerkingen. Milde maag- en darmklachten zoals lichte diarree, oprispingen en gasvorming kunnen echter optreden bij het gebruik van Obesimed®. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen na een aantal dagen. Raadpleeg uw arts indien klachten langer dan 3 dagen aanblijven.

Totaal netto gewicht:

45 capsules 40 gram, 135 capsules 121 gram, per capsule 895 mg.

Wijze van bewaren:

Bij kamertemperatuur (15-25°C) op een droge, donkere plaats bewaren, in de originele verpakking.

Medisch hulpmiddel:

De productie geschiedt volgens strenge kwaliteitseisen conform ISO 13485: 2003. Obesimed® is een medisch hulpmiddel klasse IIA conform de medische hulpmiddel richtlijn 93/42/EEC.

De Obesimed® informatielijn:

Bel voor specifieke vragen over dit medisch hulpmiddel de Obesimed infolijn: 0900-5826848. Dit speciale informatienummer is te bereiken tijdens kantooruren.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik van Obesimed® na de datum op de verpakking achter 'ten minste houdbaar tot' wordt afgeraden.

Datum waarop deze gebruiksaanwijzing voor het laatst is herzien: November 2008 IFU:OB10-08

Obesimed® is a registered trademark and is produced under licence from PK.



Fabrikant: PK Benelux I Pharma Care BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden NL

+31 (0)900-5826848